

**FINALIDADE**

Resina acrílica autopolimerizável para uso profissional odontológico, desenvolvida para confecção de aparelhos ortodônticos e placas de mordida.

**CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS**

A Triunfo Resina Acrílica Orto apresenta grande variedade de cores possibilitando a personalização dos trabalhos. Apresenta alta estabilidade de cores e resistência à abrasão. Pode-se misturar resinas de diferentes colorações para se obter novas matizes. Apresenta baixo escoamento facilitando o trabalho do profissional.

**APRESENTAÇÕES****Variação de cores**

Concentradas: amarelo concentrado, azul concentrado, laranja concentrado, rosa concentrado, roxo concentrado e verde concentrado.

Florescentes: azul fluorescente, abacaxi fluorescente, amarelo fluorescente, celeste fluorescente, esmeralda fluorescente, laranja fluorescente, lilás fluorescente, limão fluorescente, maravilha fluorescente, mexerica fluorescente, pink fluorescente, rosa fluorescente, roxo fluorescente, turquesa fluorescente, verde fluorescente e violeta fluorescente.

Metalizadas: cinza metalizado, dourado metalizado, ouro metalizado e prata metalizado.

Perolizadas: azul pérola, branco pérola, dourado pérola e verde pérola.

Sólidas: azul mar, branco, incolor, preto e vermelho.

**Embalagens**

Resinas concentradas: frasco de 20g.

Demais resinas: sachê de 10g; frascos de 50g, 80g e 225g; potes de 450g e 1 Kg.

**COMPOSIÇÃO**

Polimetilmetacrilato (PMMA), peróxido de benzoíla, pigmentos biocompatíveis e fluorescente.

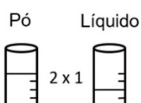
**ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

**INSTRUÇÕES DE USO**

**Preparo:** Agitar antes de usar. Recomenda-se realizar os trabalhos em ambiente com temperatura entre 20°C a 25°C. Os recipientes e materiais devem estar limpos e livres de contaminantes. Recomenda-se o uso do Líquido Acrílico Autopolimerizável Triunfo Dents, com ou sem crosslink, para garantir o desempenho do produto.

**Técnica convencional:** hidratar o modelo de gesso por 10 a 20 minutos para evitar formação de bolhas durante a polimerização da resina. A proporção para pó/líquido é 2:1 (2 medidas de pó para 1 medida de líquido).

Proporção da mistura: 

Despejar o líquido no pote dappen e adicionar gradativamente o pó. Homogeneizar cuidadosamente com espátula, evitando a incorporação de bolhas de ar. Aguardar a fase plástica. Espalhar a resina de forma uniforme sobre o modelo devidamente isolado (recomenda-se o uso do Isolante Triunfo). Remover o excesso com auxílio de um esculpador lecron embebido no monômero (líquido). Levar o modelo em uma polimerizadora submerso em água com temperatura entre 35°C a 40°C e aplicar pressão de 1,5 bar (20 psi). Aguardar a polimerização por 15 minutos. Remover o aparelho do modelo de gesso. A temperatura indicada da água quente para polimerização, auxilia na diminuição do monômero residual e proporciona maior translucidez.

## TRIUNFO RESINA ACRÍLICA ORTO

Resina acrílica autopolimerizável para ortodontia

Ficha Técnica  
SGQ-FT-10, revisão 2



**Técnica gotejamento:** hidratar o modelo de gesso por 10 a 20 minutos para evitar formação de bolhas durante a polimerização da resina. Com o modelo de gesso devidamente isolado (recomenda-se o uso do Isolante Triunfo), aplicar camada de pó com aproximadamente 1 mm de espessura. Gotejar o líquido até que seja totalmente absorvido pelo pó. Repetir o procedimento de aplicação de camadas até preencher o modelo e atingir a espessura desejada. Remover o excesso com auxílio de um esculpidor lecron embebido no monômero (líquido). Levar o modelo em uma polimerizadora submerso em água com temperatura entre 35°C a 40°C e aplicar pressão de 1,5 bar (20 psi). Aguardar a polimerização por 15 minutos. Remover o aparelho do modelo de gesso. A temperatura indicada da água quente para polimerização, auxilia na diminuição do monômero residual e proporciona maior translucidez.

**Acabamento e polimento:** Iniciar o acabamento utilizando fresa de tungstênio e finalizar com lixa de textura fina para uniformizar a superfície. Realizar limpeza da peça com água e detergente. Secar toda superfície utilizando ar comprimido isento de óleo. Recomenda-se o uso de escova macia e do bastão para polimento Triunfo Bril.

### ADVERTÊNCIAS

Atenção. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Tóxico para organismos aquáticos com efeitos prolongados.

### PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Seguir as instruções de uso para que o desempenho do produto não seja afetado. Agite antes de utilizar o produto. Não utilize o produto caso perceba alguma alteração. Manuseio não recomendado para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilização reconhecida. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção respiratória. Utilize apenas em locais bem ventilados. Evite inalar as poeiras. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Em caso de contato acidental com a pele ou olhos, lave com água em abundância. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de inalação, remova a pessoa para local bem ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um médico. Não reutilizar a embalagem. Evite a liberação para o meio ambiente. Recolha o material derramado. Descarte o conteúdo e recipiente de acordo com a legislação vigente.

### CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 20795-2:2020 - Polímero para Ortodontia - Tipo 1  
ANVISA RDC nº 751/2022 - Dispositivo Médico - Classe II Médio Risco - Resina Acrílica Odontológica

### NOTIFICAÇÃO ANVISA Nº 80772739001

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA RDC nº 665/2022.

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza  
CRQ IV nº 04263547



REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110

Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho

CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483

@@triumfodents / vendas@triumfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br