

FINALIDADE

Isolante para uso profissional odontológico, desenvolvido para isolamento de gesso em trabalhos protéticos com resinas acrílicas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

Compatível com resinas acrílicas auto e termopolimerizáveis. Ótima fluidez e secagem rápida para facilitar o trabalho. Filme com alta capacidade isolante e espessura adequada para não interferir nas dimensões da peça confeccionada.

APRESENTAÇÕES

Frascos de 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1 L.

COMPOSIÇÃO

Água potável, alginato de sódio, benzoato de sódio e timol.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar. Manter o recipiente hermeticamente fechado.

INSTRUÇÕES DE USO

Agitar antes de usar. Hidratar o modelo de gesso por 10 minutos antes da aplicação do Isolante Triunfo. Despejar a quantidade necessária de Isolante Triunfo em um pote dappen. Utilizar pincel limpo para aplicação do Isolante Triunfo na superfície desejada de gesso. Aplicar em sentido único até obter uma camada de textura lisa e brilhante. Aguardar 2 minutos e iniciar a aplicação da resina acrílica sobre o modelo de gesso. Quando utilizar modelo de gesso com dentes previamente arranjados, evitar que o Isolante Triunfo entre em contato com a parte posterior dos dentes. Quando utilizar película plástica separadora na primeira prensagem, aplicar Isolante Triunfo somente após retirada da película. Não retorne sobra do Isolante Triunfo manipulado no frasco de embalagem do produto.

ADVERTÊNCIAS

Não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725.

PRECAUÇÕES

Para uso profissional odontológico. Seguir as instruções de uso para que o desempenho do produto não seja afetado. Não utilize o produto caso perceba alguma alteração. Conteúdo e recipiente equiparados a resíduos comuns.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

PRODUTO NÃO REGULARIZADO COMO DISPOSITIVO MÉDICO

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110

Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho

CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483

© triunfodents / vendas@triumfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br