

Indicação

Bloco de CERA para confecção de padrões de fundição e injeção cimentados e parafusados (subestruturas e coroas), criadas e produzidas por sistema CAD/CAM.

Advertências e Precauções

- Produto médico de uso único. Uso somente por profissionais da área odontológica capacitados em operar sistemas CAD/CAM;
- Recomenda-se uso de equipamento de proteção individual, como máscara e óculos;
- A poeira criada durante a usinagem pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias.
- Conservar ao abrigo de luz, calor e umidade;
- Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

Instrução de Uso

O Triunfo Block Wax deve ser fixado na máquina de usinagem de acordo com as instruções do fabricante do equipamento.

Observação importante: Evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento. Temperatura ideal para trabalho: entre 20°C a 30°C.

Benefícios / Características

- Cera de alta qualidade especial para usinagem
- Completamente calcinável
- Redução nos tempos de usinagem
- Fácil extração
- Ideal para processo de fundição e injeção
- Excelente usinabilidade
- Baixo desgaste da ferramenta na usinagem CAM
- Bom contraste.

Modelos e Dimensões

TBW: 12mm,14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm

TBA: 12mm,14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm

TBZ: 12mm,14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm

TBS: 16mm

Cores

Azul e Marfim

Composição

Cera natural, Polímeros sintéticos hidrocarbonetos e Pigmentos.

Validade

10 anos após a data de fabricação

Embalagem

Contêm seis peças do modelo TBS em uma caixa, e para os modelos TBZ, TBA, e TBW contém uma peça por caixa.

Armazenagem

- Conservar ao abrigo da luz e calor;
- Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d'água ou no lixo doméstico.

Produto Declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico

Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547

Advertências e Precauções

- Não há efeito adverso reconhecido quando utilizado de acordo com as técnicas profissionais usuais.
- As cores do produto podem variar devido ao uso de Cera Natural

NOTIFICAÇÃO ANVISA

Produto fabricado em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Resolução ANVISA na RDC vigente

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Francisco Pimenta de Souza
CRQ IV nº 04263547

REAW - Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ 11.959.613/0001-77 - IE 536.147.558.110
Rua Octávio de Freitas Filho, 350, Polo Industrial Guilherme Muller Filho
CEP 13632-622 - Pirassununga/SP - Fone (19)35650483
@triunfodents / vendas@triunfodents.com.br / www.dentetriunfo.com.br

A versão impressa desta Ficha Técnica pode ser solicitada gratuitamente através dos contatos de atendimento ao cliente.