



## FICHA TÉCNICA – DUPLICADOR

### Indicação

Duplicação de modelos protéticos nas fundições de cromo-cobalto.

### Advertências e Precauções

- Lavar bem após o uso e quando estiver grosso, acrescentar água;
- Mantenha o frasco fechado.

### Instruções de Uso

Cortar o DUPLICADOR em pequenos pedaços e levar ao fogo, sem deixar ferver. Deixar esfriar até cerca de 50°C e verter na mufla, tomando o cuidado prévio de enxugar o modelo de gesso. Após verter, deixar esfriar até endurecer, para preencher com revestimento.

| Potência do Forno (watts) | Ciclo do Micro-Ondas     |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                           | 500g de Duplicador       | 1000g de Duplicador       |
| 500                       | 5 min. 100% + 3 min. 50% | 7 min. 100% + 6 min. 50%  |
| 800                       | 3 min. 100% + 4 min. 20% | 5 min. 100% + 4 min. 50%  |
| 900                       | 3 min. 100% + 3 min. 50% | 4 min. 100% + 4 min. 50%  |
| 1200                      | 2 min. 100% + 1 min. 20% | 3 min. 100% + 3 min. 50%  |
| 1400                      | 2 min. 100% + 1 min. 20% | 3 min. 100% + 26 min. 50% |

### Características/Benefícios

- Possui alto poder de cópia.
- Permite maior aproveitamento devido à excelente fluidez.
- Pode ser reciclado adicionando-se água até atingir a fluidez desejada.
- Pode ser derretido em banho-maria, equipamento próprio ou micro-ondas.
- Não forma resíduos, mantendo a qualidade e translucidez inicial.
- Mantém suas propriedades após vários ciclos e rende muito.

### Apresentação

Pote de 1000g.

### Composição

Água, Agar-Agar, Glicerina, Antiespumante e Conservantes.



## **Validade**

02 anos após a data de fabricação.

**Declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.**

## **Responsável Técnico**

Francisco Pimenta de Souza – CRQ IV 04263547